



Compo-Vibes

Instrument à composites

Pièce à main avec inserts vibratoires

Compo-Vibes est une pièce à main avec **inserts vibratoires** pour les résines composites combinant le **modelage conventionnel aux micro-vibrations**, mais également pour le **scellement des pièces prothétiques**.

Les embouts amovibles s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque secteur et de chaque travail à effectuer.

La pièce à main Compo-Vibes est munie d'un bouton qui permet un fonctionnement soit en mode **continu**, soit par **impulsions**.

Compacte et légère, elle fonctionne avec une fréquence de vibration suffisante pour condenser et/ou modeler les composites dans les cavités.



Les **micro-vibrations** permettent d'**assouplir les composites** pour une meilleure adaptation et une meilleure mise en forme et diminuent l'inclusion de bulles d'air. Cela est indispensable pour les composites les plus fermes, mais également très intéressant pour des composites plus conventionnels.

Les **micro-vibrations** facilitent également l'obtention **rapide** d'une morphologie occlusale. De même, elles facilitent l'étalement du composite, ce qui réduit considérablement les échecs liés à la non-adaptation du composite aux parois, aux manques et aux irrégularités.

Les brosses sont destinées à la coloration des composites. Leur fibre synthétique noire permet une précision extrême avec le meilleur contraste. Une qualité de travail supérieure aux pinceaux standards que l'on trouve habituellement dans les kits composites.



L'instrument se complète par des embouts en polycarbonate offrant de nouvelles indications, notamment le **scellement ou le collage** de facettes, inlays et onlays.



Par rapport aux embouts en métal, l'intérêt est d'une part, la non-agressivité des embouts vis-à-vis des **restaurations prothétiques**, et également une meilleure répartition du mouvement, grâce à leur forme étudiée. Les **micro-vibrations diminuent la viscosité** du ciment et améliorent son étalement pour optimiser la mise en place profonde et précise de la pièce prothétique.

[Je découvre](#)

Références :

SL00133 : Coffret Basic
SL00132 : Coffret Master
SL00134 : Assortiment de 4 inserts

Pour toute question complémentaire, contactez le **04 90 42 92 92** ou anne.picavet@fip-group.fr

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE - DM I - Smile Line
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.

